

大きくなった!

「伸長器」の実力

「ペニスを伸ばす器具というのを見たことは、ありませんでした。おそらく世界でも初めてではないでしょうか。着けるだけで最大5cmも伸びるとするメーカーの治験結果が確かならば、まさに福音と言えます。今まで手術し

か実現できなかったことが手軽にできるようになり、世界中の男性を救う奇跡の器具になるかもしれません。私も、今年9月に行われる日本性機能学会で、この器具の存在を報告するつもりです」(やじま泌尿器科クリニック院長・矢島通孝氏)

ひょっとすると、「セイクの発明」と言えるかもしれない。装着するだけでペニスが伸びるといふ夢のような器具が誕生した。現在ヨーロッパで話題になっているアンドロペニスが、それだ。スペインの医療メーカー・アンドロメディカル社が92年

に開発し、以来改良を重ね、すでに一万個以上を売り上げている。ヨーロッパ連盟衛生当局やドイツの衛生省、メキシコ連邦衛生当局などが医療器具として認可しているスグレモノなのである。

アンドロメディカル社が22〜60歳までの男性を対象に行った臨床実験では、37人中35人に効果が認められているという。スペインの泌尿器科の医師の実験でも効果は明らかになっている。アンドロメディカル社のホームページには、体験者たちの喜びの声がヨーロッパ中から寄せられている。

「夫婦生活が退屈になり、妻とお互いの性生活観について話し合いました。その場で、妻が『ペニスが大きい男性を想像すると興奮する』と告白したのできっかけで、アンドロペニスを試してみたいんですよ。着け始めてまだ3ヶ月なのにもう3cmも長くなり、太さも倍増しました。おかげで妻も大喜び、夫婦生活も円満です」(46歳・イタリア人男性)

「僕はペニスが小さくて悩んでいました。更衣室で友人に

からかわれ、性交渉の時に女性に幻滅されました。でも、この伸長器のおかげで今ではすっかり元気で。アンドロペニスによって人生ががらりと変わりました」(36歳・在欧日本人男性)

「ペニスに自信が持てず女性恐怖症になっていましたが、4cmもたくましく伸びたため、今では女性に積極的に話しかけられるようになりました。スポーツジムで、若い男

いったん伸びれば元に戻らない

性からうらやましうに股間を見られることも、僕の活力になっていきます」(43歳・ベルギー人男性)

あるコンドームメーカーの調査によると、日本人男性の非勃起時のペニスの長さは平均で8〜9cm、勃起時で13〜14cm。世界の非勃起時の平均は13〜15cmだと言われる。4cm伸びただけでも、いかに男性にとって自信につながるかがわかる。

器具自体は極めてシンプルだ。シリコン製のベルトと金属製の細長い棒に連結されたプラスチックの輪でできている。細長い棒にはバネが内蔵されている。使い方は、プラスチックの輪の中にペニスを通し、亀頭のカリの部分にシリコンベルトを巻くだけ。すると内蔵されたバネの力で常にペニスが伸びるのである。その状態を続けることでペニスが長くなるというものだ。器具の長さは、ペニスのサイズに応じて調整できる。

装着時間は一日10時間が目安だが、初日から5日間は3時間、6日〜10日目まで6時間、11日〜15日目まで8時間といった具合に、少しずつ伸ばしていく。器具のサイズも5日ごとに0.5cmずつ伸ばしていく。装着期間は約6ヵ月だ。

アンドロメディカル社によると、臨床実験ではペニスの長さは最大で5cm、平均して4cm、太さも確実に1cmアップしたという。いったん長くなったペニスは二度と元の大きさに戻らなかった。

装着、取り外しは簡単。勃

スペインの医療メーカーが発売

5cmも チンポコ

起したときの少々の圧迫感を除けば、ほとんど痛みはない。6ヵ月かけてゆっくりペニスを伸ばすので、性的能力や勃起機能にもまったく影響がないという。ペニスにフットしたスリムな形状なので、ズボンや水着の上からでも目立たない。必ずしも長時間装

着し続ける必要はなく、適宜に外して休憩をとってもよい。排泄時や性交渉の時など器具を取り外し、ペニスをマッサージすることも大切だという。

アンドロペニスは体の伸長機能を利用してようだ。前出の矢島院長が話す。

「原理的には長期間引っぱられることでペニスが伸びても不思議ではありません。たとえば、筋肉だって鍛えれば太くなるし、皮膚も常時引っ張

曲がったペニスも70%治る

アンドロペニスには、他にも利点がある。

まず、副作用やペニスが変わ形することをあまり心配しなくてよい。これまでもペニスを大きくする手段として、シリコンや脂肪を注入する形成外科手術があった。しかし、形崩れを起したり脂肪が固まったりするなど、術後の不安要素も多い。アンドロペニスでは、薬やシリコンなどを入れるわけではないので、こうした危険性は少ない。

また、湾曲したペニスの場合、小さくてもペニスを大きく伸ばす！

つていけば伸びます。同じように、ペニスも長い期間牽引した状態にあれば伸びる可能性は十分あります。

ペニスは主に海绵体と白膜でできています。海绵体にも2本の陰茎海绵体と尿道海绵体があります。陰茎海绵体は白く硬い膜に覆われていますが、この膜が白膜です。その周りを皮膚が覆っているという構造です。主な構成器官である海绵体と白膜を長くすればペニスも伸びます」

矯正もできる。アンドロメディアカル社の臨床実験では、勃起するとペニスが曲がった状

態になってしまいう陰茎湾曲症の男性が6ヵ月間装着したところ、70%の人が矯正できたという結果が出ている。

現在、アンドロペニスは北米、中東、オセアニアなど世界数十カ国で販売されている。残念ながら治療の行われていない日本では、医療器具として認められていないため販売されていない。アンドロメディアカル社は厚生労働省に美容健康器具として認可申請している。国内で手に入れることは難しいが、許可を受けたヨーロッパで入手することは容易だ。値段は3500円。日本円で約4万5000円と少々高めだが、これで男の自信が回復するのなら安いものかもしれない。

人は
ウイルスで
進化している

この本を読めば、
あなたはもうウイルスを
恐れなくていい!

知道出版 定価1260円
〒101-0051 千代田区神田神保町1-40豊明ビル
TEL03-5282-3185 FAX03-5282-3186